



Abbott



PLATAFORMA MOLECULAR ID NOW™


PRUEBAS DISPONIBLES:

COVID-19

INFLUENZA A&B 2

RSV

STREP A 2

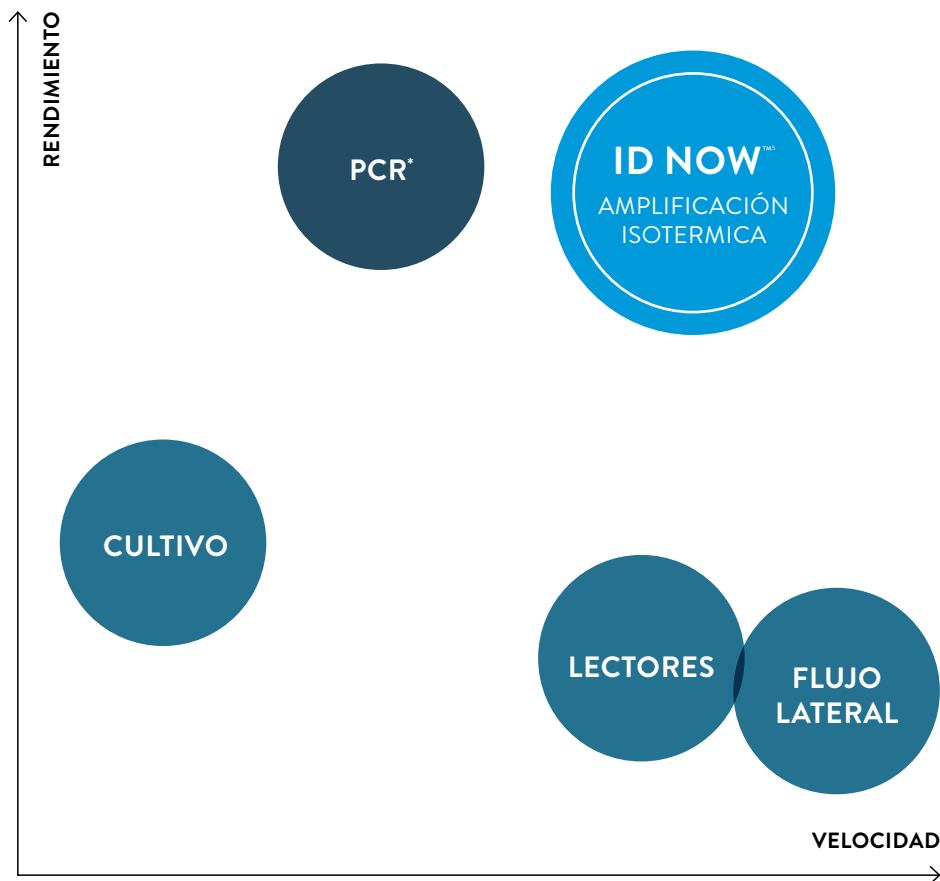

VELOCIDAD Y PRECISIÓN COMBINADAS


ID NOW¹ utiliza la tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos para la detección cualitativa de diversas enfermedades infecciosas permitiendo tener resultados oportunos, precisos y al lado del paciente.

AUMENTE LA PROBABILIDAD DE DETECCIÓN CON ID NOW

Los métodos no moleculares convencionales no tienen la capacidad de amplificación, por lo tanto, solo detectarían lo que está dentro de su límite de detección. Las muestras con cargas víricas/bacterianas bajas pueden producir falsos negativos como resultado.

*PCR, cultivo, inmunocromatografía, Inmunofluorescencia.


FALSO NEGATIVO

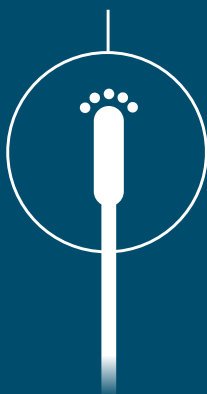

MÉTODOS
NO MOLECULARES
CONVENCIONALES



MUESTRA POSITIVA
DEL PACIENTE

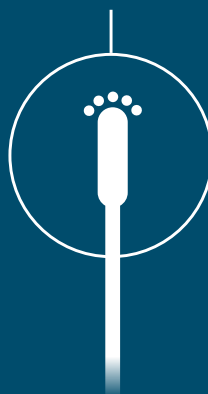

ID NOW




VERDADERO
POSITIVO



LOS RESULTADOS RÁPIDOS

El rendimiento de ID NOW Influenza A & B 2 y ID NOW RSV comparado con el método de referencia PCR en tiempo real proporciona resultados con una especificidad entre el 94% al 100%. Así, podrá tomar decisiones fiables, eficaces y significativas para sus pacientes.

- ID NOW detecta el SARS-CoV-2 en 13 minutos o menos.⁵
- Si el ID NOW se establece en “detección temprana”, se mostrará un resultado positivo para la gripe A o la gripe B inmediatamente después de su detección y si el resultado es negativo en 13 minutos.²
- ID NOW RSV es una prueba isotérmica de detección rápida con resultados en menos de 13 minutos.³
- ID NOW Strep A 2 es una prueba isotérmica rápida que proporciona resultados en 6 minutos.⁴

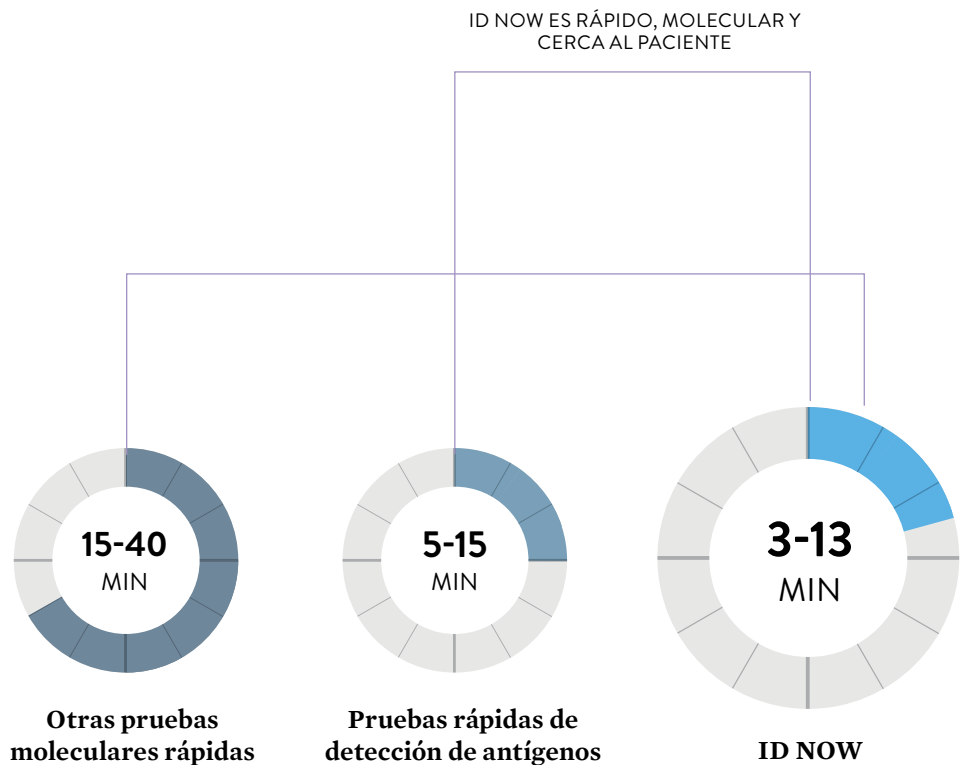

ID NOW⁵ cuenta con una tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos; todo dentro de un cartucho. En lugar de ciclos térmicos, el sistema utiliza enzimas para impulsar rápidamente el proceso de amplificación.¹

Al fin podrá utilizar las palabras “resultados moleculares” e “increíblemente sencillos” en una misma frase. Con su diseño intuitivo y compacto, ID NOW es ideal en múltiples entornos médicos que intervienen en el cuidado del paciente.

TODAS LAS VENTAJAS. Y FÁCIL DE USAR.

- Pequeño y portátil, maximiza el espacio en la mesa y puede utilizarse en el punto de atención al paciente.
- Interfaz visual de pantalla táctil con instrucciones paso a paso.
- Resultados automatizados en pantalla para eliminar todos los errores de subjetividad e interpretación.
- Consumibles de pruebas con clasificación por colores para orientar al usuario.
- Conectividad: Los registros se pueden transmitir a un sistema de información de laboratorio (LIS) o a un sistema de gestión de datos de análisis point of care (POC DMS).





ID NOW combina las ventajas de la rapidez y la precisión. Esto disminuye los riesgos de salud de los pacientes mejorando las decisiones clínicas. Un resultado molecular rápido con ID NOW significa que ya no tiene que elegir.

PRUEBAS ID NOW™ DISPONIBLES

ID NOW™ COVID-19⁵
EXENTA DE LOS REQUISITOS CLIA

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2²
EXENTA DE LOS REQUISITOS CLIA

ID NOW™ RSV³
EXENTA DE LOS REQUISITOS CLIA

ID NOW™ STREP A 2³
EXENTA DE LOS REQUISITOS CLIA



INFORMACIÓN DE PEDIDO

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO DE PRODUCTO
INSTRUMENTO ID NOW	NAT-000
ID NOW COVID-19 KIT DE 24 PRUEBAS	191-000
ID NOW COVID-19 COVID-19 CONTROL SWAB KIT	190-080
ID NOW INFLUENZA A&B 2 KIT DE 24 PRUEBAS	427-000
ID NOW INFLUENZA A&B 2 INFLUENZA A&B 2 CONTROL SWAB KIT	425-080
ID NOW RSV KIT DE 24 PRUEBAS	435-000
ID NOW RSV RSV CONTROL SWAB KIT	435-080
ID NOW STREP A 2 RSV CONTROL SWAB KIT	734-000
ID NOW STREP A 2 STREP A 2 CONTROL SWAB KIT	734-080

UN ACCESO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN PERMITE DECIDIR UN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO.

ID NOW⁵ proporciona sensibilidad molecular en un plazo práctico y permite hacer un uso prudente de los antibióticos. ¿Desea obtener más información sobre diagnósticos rápidos y la administración de antimicrobianos? Visite [TestTargetTreat.com](https://www.testtargettreat.com) hoy mismo.



Referencias:

1. ID NOW™ Manual del usuario
2. ID NOW™ Influenza A&B 2 Prospecto
3. ID NOW™ RSV Prospecto
4. ID NOW™ Strep 2 Prospecto
5. ID NOW™ COVID-19 prospecto

* CLIA - Clinical Laboratory Improvement Amendments (Enmiendas para la mejora de los laboratorios clínicos)

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO
CON SU REPRESENTANTE LOCAL O VISITE [GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT](https://www.globalpointofcare.abbott)**

© 2021 Abbott. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales mencionadas pertenecen o bien al grupo de empresas Abbott o bien a sus respectivos propietarios. Todas las fotografías se muestran únicamente con fines ilustrativos. Las personas que aparecen en esas fotografías son modelos. COL-07516-01 09/21

